



[Fiche technique]

Aniospray Surf 29

Réf. 501587 - 970069

Désinfectant à pulvériser

Désinfection rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs préalablement nettoyés.

Produit prêt à l'emploi, limpide et incolore.

Actif sur virus enveloppés en 1 min.

Ne laisse pas de trace au séchage, ni de film gras après pulvérisation.

Informations complémentaires

Pourcentage d'éthanol : 29% v/v.

pH à +20°C : environ 5.5

Compatible avec tous types de matériaux.

Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus.

Durée de vie : 3 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Couleur	Incolore
Conforme 10g	Non
Matière	Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), excipients.
Normes et Certification	NF T 72-281 EN1040, EN 13727, EN 13697, EN 1275, EN 13624
Instructions d'utilisation	Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant. Pulvériser les surfaces verticales et des dispositifs médicaux puis le mobilier du fond de la pièce jusqu'à la sortie. Laisser la pièce fermée pendant 5 min minimum. Aérer si possible avant réutilisation. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau ou les muqueuses.
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 970968 - Pulvérisateur pour ANIOSPRAY SURF 29

Références

Réf. 970069	Aniospray Surf 29 flacon 1L Caractéristiques produit : sans pulvérisateur
Réf. 501587	Aniospray Surf 29 bidon 5L Caractéristiques produit : sans pulvérisateur

Photos

