



[Fiche technique]

## Bande élastique adhésive de contention

Réf. 304141 - 304142 - 304140 - 304143

### Urgo strapping.

Maintient les articulations qui en ont besoin pour permettre de reprendre les activités.

S'adapte parfaitement aux mouvements et laisse respirer la peau.

Présence de lisières non tissées garantissant l'absence de risque de striction locale.

## Informations complémentaires

Contre-indiqué dans le maintien de matériel humide, et donc dans l'indication de maintien de sondes en réanimation.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Urgo
<b>Matière</b>	Bande élastique tissée enduite d'une masse adhésive élastomérique sans solvant.
<b>Unité de vente</b>	Le rouleau
<b>Instructions d'utilisation</b>	Utiliser sur une peau sèche, saine et dégraissée. Couper la longueur de bande désirée et décoller le papier protecteur à une extrémité, poursuivre son décollement au fur et à mesure de la pose. Construire la contention en appliquant une tension plus ou moins importante à la bande en fonction de l'effet recherché. Consolider la contention par le recouvrement de chaque bande à une ou deux reprises, en respectant le recouvrement d'au moins la moitié de la première bande.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1

## Références

<b>Réf. 304141</b>	Bande élastique adhésive - Rouleau de 2,5 m x 3 cm
<b>Réf. 304142</b>	Bande élastique adhésive - Rouleau de 2,5 m x 6 cm
<b>Réf. 304140</b>	Bande élastique adhésive - Rouleau de 2,5 m x 8 cm
<b>Réf. 304143</b>	Bande élastique adhésive - Rouleau de 2,5 m x 10 cm

## Photos



Urgo strapping bande de contention  
élastique adhésive



Urgo strapping bande de contention  
élastique adhésive