



[Fiche technique]

Barquette d'évacuation Ferno 71

Réf. 507001

Idéale pour le dégagement de victimes dans les endroits inaccessibles aux brancards traditionnels.

Barquette treuillable et verticalisable.

Matelas mousse plastifié amovible, d'épaisseur 3 cm, soudé haute fréquence pour une étanchéité parfaite et un entretien facilité.

Résiste aux produits chimiques, aux UV et à la corrosion.

Tubes raidisseurs alu de gros diamètre pour un portage plus confortable et facile. Les glissières moulées et les poignées facilitent la manipulation de la barquette.

12 poignées de portage, 8 sur le pourtour, 4 aux extrémités.

Encombrement minimum grâce à sa largeur de 61 cm.

4 œillets laiton sertis pour la fixation de l'élingue de treuillage.

Cordage périphérique blanc pour fixation des sangles de victime (nombreuses possibilités)

4 trous de drainage pour laisser les liquides s'écouler, 2 au niveau de la tête, 2 au niveau des pieds.

L'utilisation d'une élingue (en option) peut faciliter et accélérer le montage d'une ligne de câblage pour connecter directement la barquette au câble de treuillage.

Informations complémentaires

Coque avec stabilisateur d'UV, épaisseur 6 mm.

Matelas mousse 3 cm d'épaisseur soudé haute fréquence pour une étanchéité parfaite et un entretien facilité

Tubes raidisseurs alu de gros diamètre pour un portage plus confortable et facile.

Caractéristiques techniques

Marque

Ferno

Dimensions	(Lxlxh) 218 x 61 x 19 cm
Caractéristiques produit	Durée de vie maximale conseillée : 7 ans (en fonction des conditions d'utilisation et de stockage). Conseil pour le changement de corde : Pour installer la corde sur la barquette d'évacuation, commencez par l'extrémité de la tête de la barquette, pliez la longueur de corde prédécoupée en deux et passez la à travers les deux premiers trous de corde à l'extrémité de la barquette (de l'extérieur vers l'intérieur), passez de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur à travers les trous de corde des deux côtés de la barquette. La corde finira de l'intérieur vers l'extérieur aux deux derniers trous à l'extrémité du pied de la barquette. Installez un serre-câble sur la corde et faites un nœud à l'extrémité de la corde, tirez la corde/serre-câble fermement à l'extérieur de la barquette, en utilisant des pinces à chaîne, saisissez la corde à l'extérieur de la barquette et tirez la bien tendue. Répétez à l'intérieur pour garder la corde tendue. Répétez l'opération autour de chaque trou de corde du panier. Une fois que vous êtes au dernier trou de corde (de l'intérieur vers l'extérieur), tirez la corde bien tendue et installez un autre serre-câble fermement contre la barquette, faites un nœud dans la corde, coupez l'excédent de corde au-delà du nœud et flambez l'extrémité de la corde pour éviter qu'elle ne s'effiloche.
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Coque en polyéthylène haute densité thermoformée avec stabilisateur d'UV, épaisseur 6 mm. Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes
Unité de vente	A l'unité (sous film plastique et carton)
Poids	10.4 kg
Charge maximale admissible	272
Livré avec	1 enveloppe à l'intérieur de la barquette contenant 4 sangles nylon de maintien 150 x 4,7 cm en 2 parties avec boucles métal automatiques, 1 cale-pieds à fixation rapide et une notice
Garantie	1 an
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1
Entretien	Désinfection aisée grâce au matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro Nettoyage à l'eau savonneuse ou avec un désinfectant doux du commerce Remplacement des sangles abîmées ou du matelas en mousse si nécessaire Nettoyage haute pression possible
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3926909790
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 509011 - Sangles 2 parties FERNO 270 x 4,7 cm Réf. 509004 - Sangles 2 parties FERNO 210 x 4,7 cm Réf. 509018 - Sangle 2 parties FERNO 140 x 4 cm Réf. 509016 - Sangles 2 parties FERNO 275 x 4,7 cm Réf. 507034 - Sangles 2 parties FERNO 150 x 5 cm Réf. 507002 - Sangles 2 parties FERNO 150 x 4,7 cm Réf. 503016 - Sangles 2 parties FERNO 152 x 5 cm Réf. 507111 - Elingue de treuillage à inclinaison réglable Réf. 509506 - Sac de rangement pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507013 - Bouée de flottaison pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507012 - Bras perfusion pour 71 et 71S Réf. 507641 - Couverture patient compatible barquettes FERNO 71 et 71S Réf. 507021 - Repose pieds de remplacement pour barquette de sauvetage

Photos

