



[Fiche technique]

Cardio First Angel

Réf. 290340

Massage pour tous ! Complément du défibrillateur.

Dispositif permettant un massage cardiaque efficace.

Permet à tous d'agir dans l'urgence et de sauver une vie.

Utilisation intuitive grâce aux pictogrammes sur l'appareil.

De petite taille et très léger, toujours à portée de main en cas d'urgence.

Entièrement mécanique, mise en œuvre immédiate dès son positionnement sur la victime, le massage peut commencer en suivant les « clic-clac » qui indiquent la bonne pression et le bon rythme à suivre.

- un bon placement : sa forme particulière facilite son positionnement correct sur le tiers inférieur du sternum du patient.
- une bonne position des mains : l'ergonomie de son bouton facilite le placement correct des mains pour une bonne pression, sans contact direct avec le patient.
- une bonne pression : un « clic » sonore permet d'indiquer que la force de compression est atteinte (41 kg), relâcher alors pour la décompression jusqu'au « clac ».

une bonne fréquence : à la fin de la décompression, un « clac » se fait entendre et indique ainsi qu'une nouvelle compression peut être effectuée, au rythme de 100 à 120 compressions/mn.

Utilisé également pour la formation.

Informations complémentaires

Boîte pouvant être fixée au mur. (vis non fournie)

Fabrication allemande.

Caractéristiques techniques

Dimensions	16 x 11 x 5 cm
Caractéristiques produit	Boîte pouvant être fixée au mur. (vis non fournie) Fabrication allemande.
Couleur	Rouge, Blanc, Gris
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	plastique
Poids	130 g
Livré avec	boîte de rangement et de protection.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Autres options disponibles	Signalétique à placer près de l'appareil.
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	CARDIO FIRST ANGEL
Étanche	Non
Poids du produit	0.13

Photos



Cardio First Angel aide compression
massage cardiaque RCP



Cardio First Angel aide compression
massage cardiaque RCP