



[Fiche technique]

## Ceinture standard périnéale SALVAFIX

Réf. 503970

### Contention de sécurité à fermeture magnétique.

Système d'attache sûr, rapide et efficace qui évite aux patients de se blesser et de tomber du lit ou du brancard.

Ceinture utilisée pour l'immobilisation des patients agités.

Empêche le patient de glisser vers le bas et les côtés et de prévenir le risque de strangulation, conformément aux recommandations de l'ANSM.

Munie d'un système à déplacement contrôlé, permettant au patient d'effectuer des mouvements de rotation des 2 côtés.

Partie inférieure munie de brides, se fixant au cadre de lit ou au brancard.

Repère alphanumérique permettant de mémoriser l'emplacement des fermetures pour chaque patient et facilitant la mise en place à chaque application.

Fermeture magnétique ne pouvant être ouverte qu'avec la clé magnétique de la gamme Salvafix.

## Informations complémentaires

Produit inflammable.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Medicare System
<b>Dimensions</b>	Tour de taille 68-108 cm / hauteur 18 cm.
<b>Caractéristiques produit</b>	Produit inflammable.
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	100% polyester. Absence de latex, de phtalates et de produit d'origine animale ou biologique.
<b>Taille lettre</b>	M
<b>Livré avec</b>	3 systèmes de fermeture magnétique et 1 clé.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Produit utilisé uniquement sur prescription médicale. Veillez à ce que la clé magnétique soit éloignée d'au moins 15 cm chez des patients avec régulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence ou un risque de tachycardie.
<b>Entretien</b>	A conserver à l'abri de la lumière dans un endroit propre et sec. Avant le lavage de la ceinture retirer les fermetures et la clé. Nettoyage en machine à 90° C maximum. Séchage en machine à une température modérée. Passage en tunnel de séchage possible. Nettoyer régulièrement la partie crochet de la fermeture « velcro » avec une brosse dure pour éliminer les peluches et les fils. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas repasser.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	90211010
<b>Lavable</b>	Oui
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 503976 - Clé magnétique bleue gamme SALVAFIX Réf. 503977 - Fermeture magnétique gamme SALVAFIX.

## Photos

---

