



[Fiche technique]

Chaise portoir à chenilles

Réf. 359363

Légère, fiable et facile d'utilisation.

Peut être mise en oeuvre par une seule personne; une utilisation à deux est toutefois recommandée.

Aucune charge à soulever ni à porter.

Bon maintien de la personne dans la chaise pendant l'évacuation grâce à deux sangles de sécurité.

Roues arrières pivotantes pour une meilleure maniabilité.

Permet deux utilisations :

Chaise roulante : utilisation à plat

Chaise d'évacuation dans la descente d'escaliers : le système de chenilles prend le relais et fonctionne avec le poids de la personne transportée. Evite de fournir un effort pour soulever ou porter une charge.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) Pliée 21 x 53 x 106 cm. Dépliée 89 x 53 x 140 cm
Caractéristiques produit	Dimensions (Lxlxh) Pliée 21 x 53 x 106 cm. Dépliée 89 x 53 x 140 cm
Couleur	Bleu, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Alliage d'Aluminium haute résistance
Unité de vente	A l'unité
Poids	13 kg
Charge maximale admissible	159 kg
Livré avec	Support mural et housse de rangement
Instructions d'utilisation	<p>La chaise d'évacuation doit être opérée par une personne formée à ce type de matériel d'urgence.</p> <p>Avant toute utilisation, il est impératif de vérifier l'état de la chaise et qu'aucune vis soit usée ou desserrée. Si c'est le cas, il faut remplacer la pièce immédiatement.</p> <p>Déploiement de la chaise d'évacuation :</p> <ul style="list-style-type: none">- Saisir les deux côtés du dossier puis tirer vers le haut jusqu'au clic de verrouillage.- Faire glisser l'appui-tête de façon à l'adapter à la taille de la personne.- Déverrouiller la ceinture de sécurité puis faire pivoter l'assise vers le bas.- Déverrouiller le crochet qui maintient les roues arrières pour qu'elles se mettent elles-mêmes en place grâce au verrou.- Pour une évacuation par les escaliers, à l'arrivée du nez de marche, faire pression entre les deux roues arrières pour reverrouiller le verrou.- Le porteur qui se trouve à l'arrière, bascule la chaise en l'inclinant de façon à ce que le système de chenille prenne le relais. <p>La descente peut donc être enclenchée. Il est important de veiller lors de la descente à ce que le système de chenille soit impérativement plaqué sur deux nez de marche afin d'assurer une stabilité lors de la descente. Un effort constant permet d'éviter les à-coups.</p>
Entretien	<p>Nettoyage à l'eau tiède et au savon.</p> <p>Rincer et sécher.</p> <p>Ne pas utiliser de solvants.</p> <p>Désinfection avec des produits adaptés.</p> <p>Stockage dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la corrosion.</p>
Classification	Dispositif médical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000

Photos

