



[Fiche technique]

Ethylotest ballon usage unique DMT

Réf. 999890

Permet de contrôler votre taux d'alcool.

Répond aux exigences de la directive REACH.

Pour conducteur confirmé, avec mesure du taux à 0,5 gr/L de sang (ou 0,25mg/L d'air).

Le réactif passe rouge en présence d'alcool.

Sans chrome.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	(Lxlxh) 14 x 6 x 1 cm
Couleur	Noir, Blanc, Gris
Conforme 10g	Non
Matière	plastique
Unité de vente	A l'unité (Sous sachet individuel)
Poids	12 g
Normes et Certification	NFX 20 702- 2014 Certifié NF
Instructions d'utilisation	1 - Sortir le tube, et vérifier la couleur de la pastille sur le ballon (selon la température ambiante la couleur de la pastille peut-être soit blanche soit rouge) 2 - Percuter le tube en pressant des 2 côtés, 3 - Gonfler en 1 seule fois le ballon (souffle continu et sans interruption), 4 - Insérer le tube sur le ballon, 5 - Dégonfler entièrement le ballon en 15 secondes environ puis retirer le tube, 6 - Prener le tube dans la main et le garder pendant 1 minute si la pastille sur le ballon est blanche ou 3 minutes si la pastille sur le ballon est rouge. 7 - Lire le résultat : si pas de coloration alors le test est négatif. si la coloration votre tube devient rouge, alors le test est positif : VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	382200000909

Photos



Ethylotest usage unique certifié NF -
à l'unité



Ethylotest usage unique certifié NF -
à l'unité

