



[Fiche technique]

## Glucomètre parlant VOX

Réf. 210215

### Lecteur de glycémie parlant.

Très simple d'utilisation.

Indique au patient, ORALEMENT, chaque étape à suivre pour calculer son taux de glucose et lui annonce, toujours oralement, le résultat du test en 5 secondes.

Fonction sans codage, qui évite au patient de calibrer son lecteur à chaque utilisation d'un nouveau flacon de bandelettes.

Sûreté d'un résultat fiable à 100 %.

Résultats en 4 langues : français, anglais, espagnol, arabe.

## Informations complémentaires

- Volume sanguin 0.5 µl,
- Temps de réaction d'environ 5 secondes,
- 1500 mémoires avec horodatage,
- Extinction automatique,
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL,
- Moyenne glycémique sur 7.14 jours.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Vox
<b>Caractéristiques produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Volume sanguin 0.5 µl,</li><li>- Temps de réaction d'environ 5 secondes,</li><li>- 1500 mémoires avec horodatage,</li><li>- Extinction automatique,</li><li>- Gamme de mesure 20-600 mg/dL,</li><li>- Moyenne glycémique sur 7.14 jours.</li></ul>
<b>Alimentation</b>	2 piles 1.5V AAA
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Livré avec</b>	1 autopiqueur avec embout transparent, 10 lancettes stériles, 10 bandelettes réactives, 1 solution de contrôle, 2 piles AAA, 1 carnet de suivi, 1 sacoche de transport
<b>Garantie</b>	48
<b>Instructions d'utilisation</b>	<p>Laver vos mains et le site de prélèvement, insérer une bandelette de test, choisir et inciser un site de prélèvement.</p> <p>Une fois l'échantillon de sang récupéré, le résultat est donné oralement 1 seule fois ; si besoin de retrouver la donnée, celle-ci est mémorisée dans le lecteur.</p> <p>Remplacer le capuchon du dispositif d'incision et retirer la languette usagée après utilisation.</p>
<b>Entretien</b>	<p>Nettoyé dès qu'il paraît sale, en frottant la partie extérieure du lecteur à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec soit un détergent non agressif mélangé à de l'eau ou de l'alcool isopropylique (70%)</p> <p>Ne jamais asperger le lecteur avec une solution nettoyante ou encore l'immerger dans un liquide</p> <p>Remplacer toujours les 2 piles en même temps</p>
<b>Classification</b>	Dispositif medical de diagnostic in vitro
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	90189084
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	3760164736401
<b>Étanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 210216 - Bandelettes pour glucomètre VOX

## Photos

---

