



[Fiche technique]

## **Humidificateur 200 ml MEDIWET réutilisable**

Réf. 275044

Conçu pour l'oxygénothérapie à l'hôpital ou à domicile.

Dispositif est indispensable pour pallier au dessèchement des muqueuses provoqué par l'inhalation d'oxygène sur une longue période.

## **Informations complémentaires**

Doit contenir 100 ml d'eau au minimum.

Consommation : 8 ml d'eau à l'heure, à un débit de gaz (oxygène ou air) de 10 l/min à 20°C.

Bocal et tube silicone autoclavable à 121°C pendant 30 min.

Raccordement de sortie : olive crantée pour tubulure 6x9 mm (longueur conseillée : 2 m).

Durabilité : 20 cycles d'autoclave minimum sous réserve du respect de la procédure indiquée dans la notice livrée avec le dispositif.

## Caractéristiques techniques

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                    | GCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensions                | Avec olive (LxhxØ) 6,7 x 19 x 5,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caractéristiques produit  | <p>Doit contenir 100 ml d'eau au minimum.</p> <p>Consommation : 8 ml d'eau à l'heure, à un débit de gaz (oxygène ou air) de 10 l/min à 20°C.</p> <p>Bocal et tube silicone autoclavable à 121°C pendant 30 min.</p> <p>Raccordement de sortie : olive crantée pour tubulure 6x9 mm (longueur conseillée : 2 m).</p> <p>Durabilité : 20 cycles d'autoclave minimum sous réserve du respect de la procédure indiquée dans la notice livrée avec le dispositif.</p> |
| Couleur                   | Blanc, Transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Utilisation               | Réutilisable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conforme 10g              | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matière                   | <p>Bocal Polycarbonate</p> <p>Couvercle et olive de sortie Polypropylène</p> <p>Écrou d'entrée Laiton chromé</p> <p>Diffuseur Polyéthylène</p> <p>Tuyau, joint plat Silicone</p> <p>Joint toriques Ethylène propylène</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unité de vente            | A l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids                     | 75 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entretien                 | <p>Nettoyage avec de l'eau et un détergent non abrasif, sans solvant.</p> <p>Contrôle de l'intégrité de l'humidificateur et de son étanchéité à chaque mise en service.</p> <p>Remplacement mensuel des joints conseillé.</p> <p>Remplacement du diffuseur en l'absence de micro-bulles.</p>                                                                                                                                                                     |
| Classification            | Dispositif medical de classe 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Partie du corps           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Code SH                   | 9026900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Référence fabricant (MPN) | K293491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Etanche                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Photos

