



[Fiche technique]

Mannequin Little Anne QCPR

Réf. 321015

A la fois réaliste et simple, il permet une excellente compréhension de la technique. Très pratique : rapide à installer et facile à transporter.

Un ressort est installé sous le thorax permettant de simuler une résistance thoracique réaliste.
Contrôle sonore permettant de confirmer l'efficacité de la compression thoracique (possibilité de désactiver le son).
Présence de repères anatomiques aidant au bon positionnement des mains.
L'ouverture et la fermeture des voies respiratoires s'opère par bascule de tête ou subluxation de la mâchoire.
Le ventre se soulève si les insufflations sont correctes.

L'entretien est facile grâce aux voies respiratoires jetables et au masques de visage amovibles.
Hygiénique, performant, évolutif et économique.
Conforme aux recommandations ERC et AHA 2015.

Le feedback QCPR aide les apprenants à fournir une RCP performante et conforme aux recommandations en temps réel sur les indicateurs suivants : profondeur des compressions, taux de compressions, relâchement total, temps de soins actifs suffisant, ventilation adéquate.
La technologie QCPR permet au formateur de gérer plusieurs élèves en même temps et d'évaluer l'efficacité de leurs gestes.

Applications à télécharger gratuitement sur iOS et Android QCPR Instructor App et QCPR Learner App :
Permettent d'obtenir un feedback en direct sur la qualité de la réanimation pour améliorer l'efficacité des gestes.
Fonctionne également avec le SkillGuide en option.

Informations complémentaires

Pour les 2 applications :

Feedback affiché en direct avec un résumé sur les performances de la RCP

Suggestions d'amélioration après la session

Résultats enregistrés dans l'application

Q CPR Instructor App :

Permet de suivre de 1 à 6 mannequins en simultané.

- Taux de profondeur de compression
- Relâchement correct pour chaque compression
- Position correcte des mains
- Fréquence et longueur des interruptions
- Volume de ventilation approprié
- Annotation manuelle et automatique d'évènements clés pendant la simulation RCP
- Fonction évaluation avec feedback après exercice
- Affichage des suggestions d'amélioration après la session
- Concept Q CPR Race : compétition ludique et informelle pour s'entraîner en situation de tension. Favorise l'implication des apprenants.

Q CPR Learner App :

Connexion à 1 mannequin

Conception durable

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	(Lxlxh) 65 x 34 x 21 cm
Caractéristiques produit	Pour les 2 applications : Feedback affiché en direct avec un résumé sur les performances de la RCP Suggestions d'amélioration après la session Résultats enregistrés dans l'application QCPR Instructor App : Permet de suivre de 1 à 6 mannequins en simultané. - Taux de profondeur de compression - Relâchement correct pour chaque compression - Position correcte des mains - Fréquence et longueur des interruptions - Volume de ventilation approprié - Annotation manuelle et automatique d'évènements clés pendant la simulation RCP - Fonction évaluation avec feedback après exercice - Affichage des suggestions d'amélioration après la session - Concept QCPR Race : compétition ludique et informelle pour s'entraîner en situation de tension. Favorise l'implication des apprenants. QCPR Learner App : Connexion à 1 mannequin Conception durable
Couleur	Chair, Gris, Bordeaux
Alimentation	2 piles (LR6/AA)
Conforme 10g	Non
Matière	PVC Ne contient pas de latex
Unité de vente	A l'unité
Poids	4,2 kg
Livré avec	1 sac de transport pouvant servir de tapis de sol, 2 voies respiratoires, 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 veste, 2 piles (LR6/AA), boîtier QCPR (placé sous torse) et 1 guide utilisateur
Classification	Non concerne
Autres options disponibles	Livré avec : un sac de transport souple, 4 tapis de sol, 8 voies respiratoires, 8 masques de visage, 4 vestes pour mannequins, 8 piles (LR6/AA)
Partie du corps	
Appareil connecté	Oui
Application	Qcpr
Référence fabricant (MPN)	123-01050
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage Anne Réf. 4735 - Voies respiratoires pour Little Anne

Photos

