



[Fiche technique]

Sac urinal avec substance absorbante Care Bag

Réf. 304771

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Boîte de 20

Sac urinal masculin avec un tampon super-absorbant et anti-odeurs gélifiant les matières et urines. Remplace l'urinal plastique.

Permet d'uriner discrètement à tout moment.

Informations complémentaires

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Avec cordons de serrage coulissants.



Caractéristiques techniques

Marque Cleanis

Dimensions (LxI) 38 x 16 cm. Epaisseur 40 μ

Caractéristiques produit Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Avec cordons de serrage coulissants.

Couleur Blanc

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière Sac en polyéthylène basse densité (PEBD) muni de doubles cordons de serrage. Tampon super-absorbant :

support non-tissé à base de fluff (cellulose) et de Polymère Super-Absorbants (SAP)

Unité de vente Lot de 20

Garantie

Instructions d'utilisation Mode d'emploi :

1. Ouvrir la boite et prendre un sac

2. Déplier le sac, l'ouvrir et le tenir avec les mains

3. Uriner dans le sac

4. Attendre que le contenu (+/-450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ

5. Pour fermer, tirer les cordons de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre puis nouer

Elimination:

Risque de pollution après incinération : conforme à la législation. Aucun rejet de dérivé chloré propre à la

formation de dioxine.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Code SH 5603149090

Référence fabricant (MPN) 7733993

Etanche Non

Photos

