



[Fiche technique]

## Simulation de doigt coupé

Réf. 333026

**L'image représentée fait figurer le résultat final d'une fausse plaie. A combiner avec gamme de maquillage secourisme : pinceau, dissolvant, fard**

Prothèse pour simulation de plaie hémorragique ou de fracture.

Mise en situation très rapide : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

## Informations complémentaires

Plaies réutilisables.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	Plaies réutilisables.
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Instructions d'utilisation</b>	Réalisation du maquillage : Étape n°1 : Appliquer une fine couche de latex sur la 2ème phalange du majeur Étape n°2 : Faire un cylindre de Plasto-Nat de la taille de la phalange Étape n°3 : Colorer le doigt avec du Fard jaune Étape n°4 : Appliquer sur la bordure de la partie à couper du Fard bleu puis superposer du Fard rouge. Positionner le cylindre de Plasto-Nat en continuité de la phalange Étape n°5 : Etirer le Plasto-Nat du centre vers l'extérieur Étape n°6 : Colorer l'intérieur du cratère avec le pinceau et du fard rouge sans colorer les lèvres du Plasto-Nat Étape n°7 : Remplir le cratère de sang gélifié et recouvrir les bords du Plasto-Nat
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 333300 - Palette de fard crème 10 couleurs Réf. 333301 - Sang gélifié en tube de 30 g Réf. 333304 - Latex naturel liquide 60 ml Réf. 333306 - Plasto-Nat 35 ml Réf. 333316 - Plasto-Nat 200 ml Réf. 333318 - Dissolvant pour colle Réf. 333320 - Pinceau maquillage pro N°2 Réf. 333321 - Pinceau maquillage pro N°6 Réf. 333032 - Sang artificiel normal 125

# Photos

