



[Fiche technique]

Stylo oculaire magnétique

Réf. 970900

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil

Doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil. De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières. Pratique à ranger et hygiénique grâce aux embouts qui peuvent s'emboîter dans le corps du crayon.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	plastique rondelles en néoprène boucle en nylon
Unité de vente	A l'unité
Poids	15 g
Instructions d'utilisation	-Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondamment avec de l'eau. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9018501000
Référence fabricant (MPN)	640

Photos

