



[Fiche technique]

Test Paludisme Palutop+4

Réf. 999070

Test de détection.

Le Palutop+4 est un test immunochromatographique à usage unique qui permet de diagnostiquer rapidement 4 espèces de Plasmodium (P.falciparum, P.vivax, P.malariae et P.ovale) par analyse de sang.

Peut être utilisé pour la détection spécifique de P. falciparum et P. vivax, pour le diagnostic différentiel de P. malariae et P. ovale, et pour le suivi des traitements antimalariques.

Informations complémentaires

Détection de la protéine Pf HRP-2 (spécifique de P. falciparum).

Détection de l'enzyme Pv LDH (spécifique de P. vivax).

Détection de l'enzyme P LDH (commune à toutes les espèces de Plasmodium - PAN).

Conservation entre 4 et 30°C.

Durée de vie 18 mois.

Test fiable, pratique et efficace:

- réalisable sur sang capillaire ou veineux
- traçabilité possible grâce à l'archivage des cassettes
- lecture facile et objective (absence ou présence des bandes de test)
- résultat rapide en 20 minutes

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Détection de la protéine Pf HRP-2 (spécifique de <i>P. falciparum</i>). Détection de l'enzyme Pv LDH (spécifique de <i>P. vivax</i>). Détection de l'enzyme P LDH (commune à toutes les espèces de Plasmodium - PAN). Conservation entre 4 et 30°C. Durée de vie 18 mois. Test fiable, pratique et efficace: - réalisable sur sang capillaire ou veineux - traçabilité possible grâce à l'archivage des cassettes - lecture facile et objective (absence ou présence des bandes de test) - résultat rapide en 20 minutes
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Boîte de 10
Normes et Certification	Certifié ISO 9001 ISO 13485
Instructions d'utilisation	Prélever 5µl de sang capillaire ou veineux à l'aide de l'anse fournie. Déposer les 5µl de sang dans le puits A de la cassette. Déposer 2 gouttes de tampon de lyse dans le puits B de la cassette. Lire le résultat à 20 minutes.
Classification	Dispositif médical de diagnostic in vitro
Partie du corps	
Code SH	3002109800
Référence fabricant (MPN)	PALUTOP+4

Photos

