



[Fiche technique]

Veste d'entraînement HEIMLICH

Réf. 311311 - 311313

Gilet d'entraînement et d'apprentissage à la désobstruction des voies respiratoires aériennes.

Idéale pour les formations de réanimation et de secourisme : sur une vraie personne, cette veste permet de réaliser les claques entre les omoplates et compressions abdominales (méthode de Heimlich).

Un corps étranger est expulsé si la technique est effectuée correctement.

Confortable et légère, les sangles se règlent pour s'adapter à toutes les morphologies.

Coussinet à l'arrière pour s'entraîner aux coups dans le dos, ballon à l'avant avec tube fermé par le bouchon d'expulsion.

Moins encombrante qu'un mannequin.

Repère au niveau de l'abdomen permettant de bien positionner ses mains.

Caractéristiques techniques

Marque	Act Fast
Composition de l'ensemble	1 veste Actfast 1 ballon PVC 1 ensemble de voies aériennes 10 bouchons en mousse 1 sac de rangement, 1 manuel d'utilisation
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Veste en néoprène Ballon et tube en PVC Coussinet et bouchons en mousse
Livré avec	
Garantie	1 an
Instructions d'utilisation	A utiliser sous la direction des instructeurs de secourisme La veste peut être utilisée en position debout ou couchée : utiliser le coussinet arrière pour s'entraîner aux coups dans le dos (ne pas utiliser avec force) ; compresser le creux de l'estomac, juste en dessous du sternum pour s'entraîner aux compressions abdominales afin de déloger le bouchon en mousse par éjection
Entretien	Sur l'envers de la veste, défaire les bandes velcro, enlever le ballon et le tube ; laver la veste en utilisant un détergeant doux, laisser sécher à l'air libre
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 311312 - Lot de 10 bouchons en mousse

Références

Réf. 311311 Veste d'entraînement Heimlich taille adulte

Réf. 311313 Veste d'entraînement Heimlich taille enfant

Photos

