



[Fiche technique]

## Attelles Aluform

Réf. 244001 - 244002 - 244003 - 244005

Permet de respecter la morphologie et la déformation des membres grâce à son armature aluminium/polyéthylène déformable.

Cette armature est revêtue de mousse et d'une enveloppe lavable bleue.

Fermeture et fixation par sangles à velcro.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Thuasne
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matière</b>	Aluminium 54%, Polyester 18%, Polychlorure de vinyle 15%, Polyéthylène 8%, Polyamide 5%
<b>Normes et Certification</b>	Dispositif médical de classe 1
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 244007 - Sac pour attelles Aluform Réf. 244008 - Jeu de 3 attelles avec sac de transport (avant-bras, bras/coude, jambe adulte) Réf. 244009 - Jeu de 4 attelles avec sac de transport (avant-bras, bras/coude, jambe adulte, jambe enfant)
<b>Instructions d'utilisation</b>	Insérer le membre dans l'armature. Serrer avec les sangles auto-agrippantes de manière à ce que le membre ne bouge plus. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré le produit. En cas d'inconfort, consulter ce professionnel. Pour des problèmes d'hygiène et de performance, une réutilisation de ce dispositif pour le traitement d'un autre patient est fortement déconseillée.
<b>Entretien</b>	Laver à la main et à l'eau savonneuse Essorer par pression puis sécher à l'air libre loin d'une source de chaleur.
<b>Accessoires et Consommables</b>	

## Références