



[Fiche technique]

## **Civière de relevage polyéthylène**

Réf. 506101

### **Civière de relevage pliable en polyéthylène compatible rayons X.**

Munie d'un dispositif d'écartement central longitudinal permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à bouger le patient.

Radiotransparent, facile à nettoyer.

Emplacement de tête ergonomique permettant de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale de la victime.

Simple d'utilisation, permet une intervention rapide.

La longueur de la civière s'ajuste selon la taille du patient grâce à la partie télescopique en pieds.

La civière se rabat pour un rangement compact.

10 poignées : 6 poignées latérales et 4 poignées situées aux extrémités.

Charnières invisibles permettant le pliage avant rangement.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Dépliée 165 x 44,6 x 6,5 cm. Pliée 120 x 44,7 x 8,5 cm. Longueur ajustable de 165 à 200 cm
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Matière</b>	Polyéthylène haute densité
<b>Unité de vente</b>	A l'unité sous carton
<b>Poids</b>	8.4 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	180 kg
<b>Livré avec</b>	3 sangles de maintien 130 cm en 2 parties avec boucles à déverrouillage rapide Notice
<b>Normes et Certification</b>	Conforme EN1865
<b>Instructions d'utilisation</b>	Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage. Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles.
<b>Entretien</b>	Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre. Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet. Ne pas utiliser de produit à base d'iode ou acides et basiques. Stockage dans un endroit sec.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 233111 - Housse de transport pour civière SCOOP ®

## Photos

