



[Fiche technique]

Mèches hémostatiques Coalgan

Réf. 307307

Tampon 100% végétal stérile hémostatique favorisant la cicatrisation.
Adapté à tous y compris: femmes enceintes, enfants, bébés.

Informations complémentaires

Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité.
Température de stockage < 30°C.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur d'une mèche 4 cm
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Matière	Fibre d'alginate de calcium (origine végétale).
Unité de vente	Boîte de 5 mèches hémostatiques stériles en sachet individuel.
Instructions d'utilisation	Torsader Coalgan pour obtenir une mèche compacte et introduire dans la narine. Pincer les 2 narines pendant 10 minutes. Laisser Coalgan au moins 30 minutes et au maximum 24 heures.
Classification	Dispositif médical de Classe 2b