



[Fiche technique]

Coussin hémostatique 3 parties

Réf. 304096

Kit hémostatique stérile 3 parties.

Coussin hémostatique permettant de lutter contre les hémorragies externes sans stopper la circulation du sang. Prêt à l'emploi. Se substitue à la compression manuelle en s'imbibant de sang.

Un équilibre s'établit avec la pression sanguine dans les vaisseaux, ralentissant progressivement l'hémorragie. Bande élastique avec système velcro apportant le maintien d'une pression continue sur la plaie.

Livré avec une paire de gants afin d'éviter tout risque de contamination.

Coussin 13 cm.

Informations complémentaires

Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité.

Dimensions de l'emballage : 19 x 16 x 2,5 cm

Caractéristiques techniques

Dimensions	Bande élastique (Lxl) : 90 x 10 cm. Coussin (Lxlxe) : 12,5 x 10 x 2,8 cm
Caractéristiques produit	Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité. Dimensions de l'emballage : 19 x 16 x 2,5 cm
Couleur	Jaune, Blanc
Stérile	Sterile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité (sous sachet stérile)
Poids	110 g
Livré avec	1 paire de gants, 1 notice d'utilisation
Instructions d'utilisation	Ouvrir le sachet et dérouler la bande. Poser le coussin côté compresse sur la plaie. Appuyer fermement le coussin. Enrouler la bande autour du membre en maintenant la pression sur le coussin. Le secouriste peut désormais se libérer de la compression manuelle et traiter d'autres urgences. Contrôler régulièrement le pouls en aval de la plaie. En cas d'affaiblissement de celui-ci, relâcher la pression de la bande.
Classification	Dispositif medical de classe 1s
Partie du corps	
Code SH	3005909900
Etanche	Non
Poids du produit	0.11

Photos



coussin hémostatique