



[Fiche technique]

Coussin thermique Actipoche

Réf. 304176

Poche chaud/froid réutilisable.

Permet de soulager rapidement la douleur par son action à chaud (thermothérapie) ou à froid (cryothérapie).

En application locale.

Poche contenant du gel conservant le froid accumulé dans un congélateur ou le chaud emmagasiné dans un four à micro-ondes.

Le gel reste souple et la poche épouse parfaitement les formes des zones douloureuses à traiter.

Informations complémentaires

Pratique : peut se conserver au congélateur pour être toujours prêt à l'emploi.

Caractéristiques techniques

Marque	Actipoche
Dimensions	11 x 27 cm
Caractéristiques produit	Pratique : peut se conserver au congélateur pour être toujours prêt à l'emploi.
Couleur	Noir
Utilisation	Réutilisable
Sterile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Housse : tricot brossé en polyester Gel : Propylène glycol – Polyacrylate de sodium – Colorant – Eau
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	Housse de protection auto-agrippante
Instructions d'utilisation	A chaud : - Faire chauffer le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle pendant 3 cycles de 15 secondes au four à micro-ondes (puissance 600 W), en le malaxant entre chaque cycle. - Immerger le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle pendant 1 minute dans une casserole d'eau chaude non bouillante hors du feu. A froid : - Placer le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle dans le réfrigérateur pendant au moins 2 heures. - Placer le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle dans le congélateur pendant 20 minutes maximum.
Entretien	Lavage de la housse à la main ou en machine à 30°C, séparément.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3824909299
Référence fabricant (MPN)	2350023
Etanche	Non

Photos

