



[Fiche technique]

Débitmètre Peak Flow PINNACLE

Réf. 1608

Débitmètre de pointe pour surveiller son asthme

Dispositif idéal pour les asthmatiques ayant le besoin impératif de mesures fiables, pour adultes et enfants. Conçu pour être parfaitement conforme au standard des peak-flow, apporte performance et qualité, tout en disposant d'une échelle de mesure facile à lire et sur-mesure grâce à ses zones de couleur, étudiées pour une bonne gestion de l'asthme.

Conception avancée de ce peak-flow évitant tout démontage, protégeant ainsi l'intégrité du mécanisme.

Clapet anti-retour interne évitant les problèmes d'infection croisée.

Grande précision et reproductibilité infaillible.

Informations complémentaires

Zones de couleur mobiles pour la gestion de l'asthme (personnalisable aux valeurs théoriques du patient)

Grande échelle de mesure, très facilement lisible

Échelle de débit de 60 à 900l / mn pour adulte et enfant

Type d'exploration par expiration seulement

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxl) 15 x 4 cm
Caractéristiques produit	Zones de couleur mobiles pour la gestion de l'asthme (personnalisable aux valeurs théoriques du patient) Grande échelle de mesure, très facilement lisible Échelle de débit de 60 à 900l / mn pour adulte et enfant Type d'exploration par expiration seulement
Couleur	Blanc
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	60 g
Garantie	2 ans
Normes et Certification	ISO 23747 EN 13826
Instructions d'utilisation	Insérez l'embout (M) dans l'appareil, et placez le pointeur (P) vers l'extrémité de la fente indiquant zéro. Tenez l'instrument en vous assurant de ne pas obstruer la fente ou les trous de l'extrémité. En vous tenant bien droit, inspirez pleinement et placez l'embout dans votre bouche, en vous assurant que vos lèvres sont bien fermées et que l'air ne s'échappe pas. Soufflez ensuite aussi vite et fort que possible sans que votre langue ne vienne dans l'embout.
Entretien	Votre instrument doit être nettoyé régulièrement. Pour cela, immergez-le dans une solution tiède légèrement détergente pendant 2 à 3 minutes et agitez. Rincez dans de l'eau propre tiède, puis secouez pour retirer l'excès d'eau avant de laisser sécher à l'air libre. NE JAMAIS METTRE L'INSTRUMENT AU CONTACT D'EAU BOUILLANTE
Classification	Dispositif medical de classe 1m
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Référence fabricant (MPN)	PINNACLE
Accessoires et Consommables	Réf. 291306 - Lot 100 embouts carton pour spiromètre

Photos

