



[Fiche technique]

Ethylotest électronique réutilisable ETHYWAY V2

Réf. 999094

Livré avec 5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour, 2 piles AAA 1,5V, 1 pochette de rangement en tissu.

Permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.

Compact et léger.

Equipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats.

Analyse rapide et précise du taux d'alcool.

Temps de souffle pendant toute la durée du signal sonore.

Alarme sonore en cas de dépassement du seuil contraventionnel de 0,25 mg/l.

Détection de la pression et de l'interruption du souffle par capteur de pression.

Informations complémentaires

Températures d'utilisation : entre 10°C et 40°C.

Températures de stockage : entre 20°C et 70°C.

Affichage des mesures de 0,00 à 0,49 mg/L

Compteur de test.

Indicateur de batteries faibles.

Embouts à usage unique avec clapet anti-retour.

Etalonnage tous les 12 mois par le fabricant, sans limitation de tests.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 10,4 x 5,0 x 2,1 cm
Caractéristiques produit	Températures d'utilisation : entre 10°C et 40°C. Températures de stockage : entre 20°C et 70°C. Affichage des mesures de 0,00 à 0,49 mg/L Compteur de test. Indicateur de batteries faibles. Embouts à usage unique avec clapet anti-retour. Etalonnage tous les 12 mois par le fabricant, sans limitation de tests.
Couleur	Transparent, Noir
Alimentation	2 piles AAA 1,5V alcalines
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	plastique
Unité de vente	A l'unité
Poids	55 g
Autonomie	Indicateur de batteries faibles
Livré avec	5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour, 2 piles AAA 1,5V, 1 pochette de rangement en tissu, 1 manuel d'utilisation multilingues
Garantie	1 an
Normes et Certification	NFEN 16280 Certifié NF
Instructions d'utilisation	Insérer un embout buccal sur l'embout de soufflage (changer d'embout à chaque utilisation). Utilisation des embouts : Déchirer le film de protection. Tenir le film de protection pour protéger l'emplacement où les lèvres se poseront afin d'éviter les risques de contamination. Fixer l'embout sur l'appareil tout en maintenant, à l'autre bout, le film de protection entre les doigts. Après utilisation, enlever l'embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder. Ne pas toucher les embouts jetables directement.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	3822000000
Référence fabricant (MPN)	OPETHYWAYV2
Accessoires et Consommables	Réf. 999093 - Embouts pour éthylotest ETHYWAY

Photos

