



[Fiche technique]

Garrot latex plat

Réf. 111046

Dispositif pour l'aide au prélèvement sanguin.

Informations complémentaires

Absence de délai de péremption.

Caractéristiques techniques

Marque	Comed
Dimensions	75 cm x 1,8 cm x 1.5 mm
Couleur	Blond
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Matière	Caoutchouc naturel
Unité de vente	Boîte de 25
Poids	21.5 g
Entretien	Si le garrot est visiblement souillé, ôter la souillure à l'aide d'un papier à usage unique. Immerger immédiatement et totalement le garrot dans un bain de détergent-désinfectant. Respecter le temps de contact préconisé par le fabricant. Brosser le garrot avec une brosse en plastique. Rincer de façon minutieuse et abondante à l'eau claire. Ensuite, le laisser sécher à l'air libre. Les garrots peuvent être stérilisés à la vapeur sous sachet pelable adapté à ce type de stérilisation ou en boîte inox. 121°C - 15 minutes => le produit peut être stérilisé jusqu'à 5 fois 134°C - 18 minutes => le produit peut être stérilisé 3 ou 4 fois
Classification	Dispositif médical de Classe 1