



[Fiche technique]

Garrot latex plat

Réf. 111046

Garrot plat en latex de bonne résistance et réutilisable.

Utilisation lors des prises de sang pour examens médicaux et chirurgicaux.

Dispositif pour l'aide au prélèvement sanguin.

Informations complémentaires

Absence de délai de péremption.

Caractéristiques techniques

Marque	Comed
Dimensions	75 cm x 1,8 cm x 1.5 mm
Caractéristiques produit	Absence de délai de péremption.
Couleur	Blond
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Caoutchouc naturel
Unité de vente	Boite de 25
Poids	21.5 g
Entretien	<p>Si le garrot est visiblement souillé, ôter la souillure à l'aide d'un papier à usage unique. Immerger immédiatement et totalement le garrot dans un bain de détergent-désinfectant. Respecter le temps de contact préconisé par le fabricant. Brosser le garrot avec une brosse en plastique. Rincer de façon minutieuse et abondante à l'eau claire. Ensuite, le laisser sécher à l'air libre. Les garrots peuvent être stérilisés à la vapeur sous sachet pelable adapté à ce type de stérilisation ou en boîte inox. 121°C - 15 minutes => le produit peut être stérilisé jusqu'à 5 fois 134°C - 18 minutes => le produit peut être stérilisé 3 ou 4 fois</p>
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	