



[Fiche technique]

## **Gilet de désincarcération Swangard**

Réf. 753000

**Le gilet Swangard permet d'immobiliser la victime pour une désincarcération en toute sécurité.**

Idéal pour une désincarcération en toute sécurité d'une victime dans un véhicule accidenté.

Assure la prudence lors des manœuvres des pompiers.

Permet aux victimes d'être en position stable.

Facile à mettre, le gilet est optimisé pour une désincarcération rapide.

Robuste et facile à laver.

Protège la victime grâce à son système de ceinture innovant.

Les bras attachés au corps de la victime évitent une blessure lors de l'extraction du patient.

Pas d'étranglement ni d'étouffement pas rapport à un système BOA.

Requiert un minimum de sauveteurs.

[Vidéo de présentation Swangard](#)

## Caractéristiques techniques

<b>Caractéristiques produit</b>	Taille unique : le gilet s'adapte à toutes les corpulences avec son système de velcro.
<b>Couleur</b>	Jaune Fluo, Noir, Bleu
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	100% polyester
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Tailles disponibles</b>	Taille unique
<b>Livré avec</b>	Une pochette
<b>Instructions d'utilisation</b>	<p>Tirez le gilet avec les liens bleus derrière le patient. Passez les boucles rouges en dessous des bras. Fermez le gilet autour du patient. Attachez également les bras. Accrochez le gilet au volant et serrez les sangles pour dégager le dossier. Rabattre ou retirer le dossier. Placez la planche dorsale. Desserrez les sangles du volant et placez lentement le patient en arrière sur la planche dorsale. Tirez le patient sur la planche dorsale avec les sangles rouges. Tirez le gilet sous le patient.</p>
<b>Classification</b>	Epi de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	6211331000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	81-74-35

## Photos

