



[Fiche technique]

Immobilisateur de tête adulte 2 parties

Réf. 509674

Spécialement conçu pour les civières de relevage grâce à ses 2 parties.

Equipé d'une sangle frontale et d'une sangle mentonnière rembourrées pour un meilleur confort.

Réglage à la taille du patient par sangles velcros.

Matériaux plastiques à haute densité.

Grands trous d'oreille pour surveiller le conduit auditif du patient.

Radiotransparent (compatible IRM et scanner).

Revêtement en plastique imperméable facilitant le nettoyage et empêchant la croissance bactérienne.

Se sépare en deux.

Composé de 2 embases avec 4 sangles avec passants & rubans accrocheurs sur le côté de chaque embase et 2 velcros d'attache passant sous la civière.

Compatible avec la plupart des civières.

Informations complémentaires

Température ambiante de stockage à l'abri de l'humidité et loin d'une source de chaleur.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Marque | Sober |
| Dimensions | (L x l x h) 39 x 24,5 x 14 cm |
| Caractéristiques produit | Embase en 2 parties : 19,5 x 24,5 x 1 cm (x2) 2 blocs latéraux : parallélépipède : 24 x 14 x hauteur haut 5 x hauteur bas 8,5 cm (x2) 1 sangle frontale et 1 sangle menton 4 sangles à boucles et 2 sangles velcro sur chaque partie d'embase |
| Couleur | Rouge |
| Utilisation | Réutilisable |
| Poids | 830 g |
| Instructions d'utilisation | <ol style="list-style-type: none">1-Fixer chaque côté de l'immobilisateur sur la civière de relevage en veillant à ce que l'ensemble soit bien immobile.2-Tout en maintenant la tête à deux mains préalablement immobilisée par un collier cervical, positionner la tête de la victime au centre.3-Placer les coussins au contact de la peau du visage sans exercer de pression.4-Placer les deux lanières : une passant sur le front et une seconde sur le menton, en exerçant une pression suffisante pour que l'ensemble immobilise la tête. Dans ce cas, le maintien de la tête par un opérateur peut être arrêté.5-Comme après chaque relevage, effectuer une surveillance avec une attention particulière à l'évolution de la douleur. <i>Conduite à tenir issue du référentiel de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 en vigueur en Janvier 2014.</i> |
| Entretien | Nettoyage recommandé avec une lingette imprégnée de produit désinfectant médical ou une solution d'alcool à 75° |
| Classification | Dispositif médical de Classe 1 |

Photos



immobilisateur tete adulte



immobilisateur tete adulte