



[Fiche technique]

Immobilisateur de tête FERNO 445

Réf. 509670

De conception robuste et durable.

Cet immobilisateur de tête est spécialement conçu pour les civières de relevage SCOOP FERNO et les plans durs NAJO FERNO. Il permet un maintien efficace et permanent de la tête tout en étant confortable pour la victime.

Informations complémentaires

2 blocs de mousse haute densité sans coutures.

Un trou dans chaque bloc permet à la victime d'entendre et aux secouristes de surveiller le canal auditif.

2 sangles de fixation rembourrées adaptables à velcro.

Radio transparent.

N'absorbe pas l'eau ni les bactéries.

Nettoyage facile.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(Lxlxh) 38 x 25,4 x 17,8 cm
Composition de l'ensemble	Embase 2 blocs latéraux Sangles frontale et mentonnière
Couleur	Orange
Poids	0,95 kg
Normes et Certification	DM de classe 1
Instructions d'utilisation	<p>1-Fixer chaque côté de l'immobilisateur sur la civière ou le plan dur en veillant à ce que l'ensemble soit bien immobile.</p> <p>2-Tout en maintenant la tête à deux mains préalablement immobilisée par un collier cervical, positionner la tête de la victime au centre.</p> <p>3-Placer les coussins au contact de la peau du visage sans exercer de pression.</p> <p>4-Placer les deux lanières : une passant sur le front et une seconde sur le menton, en exerçant une pression suffisante pour que l'ensemble immobilise la tête. Dans ce cas, le maintien de la tête par un opérateur peut être arrêté.</p> <p>5-Comme après chaque relevage, effectuer une surveillance avec une attention particulière à l'évolution de la douleur.</p> <p>Conduite à tenir issue du référentiel de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 en vigueur en Juin 2014.</p>