



[Fiche technique]

## Indicateur de fièvre frontal

Réf. 970145

### Indicateur de fièvre frontal à cristaux liquides.

Très pratique, peut être utilisé partout et par tous.

Permet d'alerter l'utilisateur sur un éventuel état fébrile, mais ne remplace pas l'usage du thermomètre médical pour une plus grande précision en cas de fièvre.

## Informations complémentaires

Incassable.

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Livré avec</b>	1 pochette cristal, 1 manuel d'utilisation
<b>Instructions d'utilisation</b>	<p>La température frontale apparaît colorée, lire ensuite la température interne approximative grâce à l'échelle sur bas de l'indicateur frontal. Au-delà de l'indication 37°, utiliser un thermomètre médical pour plus de précision</p> <p>S'il y a deux couleurs bien distinctes, la bonne lecture de température est juste entre les deux</p> <p>Ne pas utiliser l'indicateur frontal immédiatement après une exposition à des températures extrêmes (froid, soleil), après un effort physique important, ni après repas et boissons. Maintenir l'indicateur frontal 15 secondes sur le front sec au-dessus des sourcils, face unie sur la peau en conservant le contact avec deux doigts à chaque extrémité</p>
<b>Entretien</b>	<p>Pour assurer une longue durée de vie à votre indicateur frontal :</p> <p>Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation</p> <p>Évitez de l'exposer à la chaleur et à l'humidité</p> <p>Replacer dans son étui enveloppé de la notice qui le protège des effets nuisibles de la lumière</p>

## Photos

---

