



[Fiche technique]

Mannequin chocking Charlie

Réf. 321061

Pack: 1 torse adulte, 4 corps étrangers, 1 flacon de talc, 1 débardeur, 1 valise de transport. Outil de formation à la méthode Heimlich. Risque:obstruction des voies respiratoires par un corps étranger.

Tronc adulte simulant une victime en état de choc ne pouvant parler ou respirer en raison de l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger.

Conçu pour un entraı̂nement à la manœuvre d'Heimlich et au coupde poing précordial.

Remplacement facile des pièces détachées.



Caractéristiques techniques

Marque Laerdal

Dimensions (Lxlxh) 102 x 53 x 29 cm

Couleur Chair Clair

Conforme 10g Non

Matière

Unité de vente A l'unité

Poids 14.79 kg

Livré avec 4 corps étrangers, 1 flacon de talc, 1 débardeur, 1 valise de transport

Garantie 12

Instructions d'utilisation Mettre un peu de talc sur le corps étranger avant de le mettre dans la bouche du mannequin.

A l'aide de votre index, pousser le corps étranger en passant le premier point de résistance jusque dans la

gorge.

NE PAS CONSERVER LE CORPS ETRANGER A L'INTERIEUR DE LA BOUCHE LORSQU'IL N'EST PAS

UTILISE.

Entretien Toujours travailler sur une surface propre. EVITER LES MARQUEURS, LES STYLOS ENCRE, l'ACETONE,

I'IODINE OU AUTRES AGENTS TACHANT. NE PAS METTRE LE MANNEQUIN SUR DU PAPIER JOURNAL.

Nettoyer avec du savon et de l'eau. NE PAS IMMERGER LE MANNEQUIN.

Contrôler régulièrement le matériel.

Le ranger correctement à la fin de chaque session de formation.

Classification Non concerne

Partie du corps


Référence fabricant (MPN) 102-00001

Etanche Non

Poids du produit 14.79

Photos



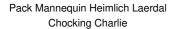



Pack Mannequin Heimlich Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich Laerdal Chocking Charlie