



[Fiche technique]

Oxymètre de pouls H100 B et capteur adulte SPO2

Réf. 410004

Moniteur de surveillance pour milieu clinique et hospitalier.

Appareil destiné à la surveillance de la saturation artérielle en oxygène (SpO2) et du pouls.

Convient pour adulte, enfant ou nouveau-né.

Écran LCD rétro-éclairé.

Affiche la valeur SpO2, la valeur du pouls, plethysmogram, barre graphe.

Compatible avec les capteurs Nellcor.

Consultation des 10 dernières minutes de courbes et de valeurs directement sur l'écran.

Capacité de mémoire de 300h soit environ 100 patients.

Alarme visuelle et sonore.

Transfert des données sur PC via le câble de l'ordinateur.

Logiciel Oximeter Viewer Data Management Software en option.

Informations complémentaires

Température de stockage : -20 à 55° C. Température d'utilisation : 5 à 40°C.

Humidité: 25% - 80%.

Fonction auto extinction pour économie d'énergie.

Tonalité variable.



Caractéristiques techniques

Marque Edan

Dimensions $(L \times I \times h) : 7 \times 3,76 \times 16 \text{ cm}$

Caractéristiques produit Température de stockage : -20 à 55° C.

Température d'utilisation : 5 à 40°C.

Humidité: 25% - 80%.

Fonction auto extinction pour économie d'énergie.

Tonalité variable.

Couleur Gris

Alimentation 4 piles AA ou batterie Ni-MH

Conforme 10g Non

Matière

Poids 165 g

Autonomie jusqu'à 48h avec les 4 piles ou 36h avec la batterie rechargeable

Livré avec 4 piles AA 1.5V

1 capteur SpO2 adulte1 manuel d'utilisateur1 bandoulière1 étui rigide

Garantie 24

Normes et Certification IEC/EN60601-1-2

IEC/EN 60825-1: 2001

Indice de protection IP 22

Entretien Nettoyer et désinfecter la surface de l'oxymètre et du capteur.

Pour nettoyer la surface de l'oxymètre:

Utilisez un chiffon doux humidifié avec un nettoyant commercial et non-abrasif ou une solution de 70% d'alcool

dans l'eau.

Essuyer légèrement les surfaces de l'oxymètre.

Pour désinfecter l'oxymètre:

Utilisez un chiffon doux saturé avec une solution de 10% de chlorine blanchie dans l'eau du robinet.

Classification Dispositif medical de classe 2b

Autres options disponibles Pack oxymètre avec les 3 capteurs.

Partie du corps

 Code SH
 90189010

 Poids du produit
 0.165

Accessoires et Consommables Réf. 410003 - Capteur SpO2 Flexmax_P réutilisable pour Nellcor OxiMax /enfant poids supérieur à 20 kg

Réf. 410002 - Capteur SpO2 DS100 A Durasensor réutilisable pour Nellcor OxiMax /Adulte poids suppérieur à

40 kg

Réf. 410005 - Pack Chargeur et Batterie pour Oxymètre H100B Réf. 410006 - Capteur réutilisable adulte pour oxymètre H100 B Réf. 410007 - Capteur réutilisable pédiatrique pour oxymètre H100 B Réf. 410008 - Capteur réutilisable néonatal pour oxymètre H100 B

Réf. 410009 - Batterie rechargeable lithium NiMH pour oxymètre de pouls H100B EDAN

Réf. 410010 - Coque de protection pour oxymètre de pouls H100 B



Photos



