



[Fiche technique]

Oxymètre de pouls Oxygo

Réf. 277012

Précision et fiabilité.

Ultra léger et résistant aux chocs.

Permet une mesure de l'enfant à l'adulte (compatible avec les doigts d'une épaisseur comprise entre 0,8 et 2,5 cm).

De taille compacte avec une coque renforcée.

Écran LCD avec un affichage simultané de :

- Saturation pulsée en oxygène (% SpO₂),
- Fréquence cardiaque,
- Intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- Témoin de charge batterie,
- Arrêt automatique au bout de 5 secondes.

Informations complémentaires

Plages de mesures :

SPO₂ : 35 % à 100% +/- %.

Fréquence cardiaque : 30 bpm - 200 bpm (battement par minute) +/- 2 bpm.

Plage de mesure de la circulation : 0,5 % - 20 %

Autonomie lorsque le témoin de charge de l'appareil s'allume : 15mn.

Caractéristiques techniques

Marque	Spengler
Dimensions	(Lxlxh) 6,5 x 3,7 x 2,9 cm
Caractéristiques produit	Plages de mesures : SPO2 : 35 % à 100% +/- %. Fréquence cardiaque : 30 bpm - 200 bpm (battement par minute) +/- 2 bpm. Plage de mesure de la circulation : 0,5 % - 20 % Autonomie lorsque le témoin de charge de l'appareil s'allume : 15mn.
Couleur	Noir, Blanc
Alimentation	1 pile AAA LR03
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	40 g (piles incluses)
Livré avec	1 housse de rangement, 1 dragonne, 1 pile AAA LR03 et 1 manuel d'utilisation
Garantie	24
Indice de protection	IP 22
Instructions d'utilisation	Désinfecter le doigt du patient à l'alcool avant l'utilisation Placer la pince sur l'ongle, enfoncer complètement un doigt dans le capteur en caoutchouc de l'oxymètre Appuyer une fois sur l'interrupteur du panneau de commande Les données s'affichent sur l'écran
Entretien	Utiliser de l'alcool médical pour désinfecter le caoutchouc en contact avec le doigt à l'intérieur de l'oxymètre
Classification	Dispositif médical de classe 2b
Partie du corps	
Code SH	9018191000
Référence fabricant (MPN)	221350/
Poids du produit	0.04
Accessoires et Consommables	

Références

Réf. 277012 Oxymètre de pouls Oxygo gris

Photos

