



[Fiche technique]

## Pansement thoracique à valve

Réf. 120105

### Diamètre 15cm

Revêtement transparent, permettant de placer la compresse directement sur la plaie et s'adaptant au torse du patient

#### Sans latex.

Pansement à valve conçu pour le traitement des plaies thoraciques ouvertes et soufflantes.

Permet à l'air de s'échapper quand le patient expire mais ne rentre pas dans la cage thoracique quand il inspire.

Pansement adhésif à base d'hydrogel médical efficace sur les peaux abîmées, sang, sueur, poils, eau....

Languette facilitant l'application et le retrait de la compresse.

Sans latex.

# Informations complémentaires

Durée de vie 5 ans.



## Caractéristiques techniques

Marque Beacon

**Dimensions** Pansement déplié ø 15 cm

Caractéristiques produit Durée de vie 5 ans.

**Couleur** Transparent

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Unité de vente Sachet individuel

Poids 30 g

**Instructions d'utilisation** Nettoyer la zone autour de la plaie.

Tenir fermement l'onglet et retirer la doublure transparente. Centrez le pansement sur la plaie avec le côté adhésif vers le bas.

Appuyez fermement le pansement sur la peau afin de le sceller complètement L'onglet peut être utilisé pour aider à soulever, retirer ou replacer le pansement. Retirer le pansement en utilisant le protocole de retrait du pansement standard.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

**Code SH** 3005100000

Référence fabricant (MPN) EMD BCS-92594

**Etanche** Non

Poids du produit 0.03