



[Fiche technique]

## Pince à tique

Réf. 304135

Conçue pour retirer facilement et hygiéniquement les tiques.  
Deux crochets de tailles différentes facilitant la saisie et le retrait de la tique selon sa grosseur.  
La précision des embouts permet de retirer la tique sans la sectionner.  
Procédé rapide et indolore.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Longueur : 12 cm
<b>Couleur</b>	Selon arrivage
<b>Matière</b>	Stylo tire-tique : polyéthylène renforcé
<b>Instructions d'utilisation</b>	Si la tête reste accrochée au premier essai, renouveler l'opération car elle suffit pour que la tique subsiste et continue d'absorber le sang. Pour une bonne extraction de la tique, tourner lentement sans tirer jusqu'à ce que la tique se décroche. Après extraction, il est important de bien nettoyer la zone avec un antiseptique.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1

## Photos

---

