



[Fiche technique]

Poche de froid instantané

Réf. 304815

Réaction chimique par percussion pour un froid instantané. La température atteint -5 °C et conserve cette valeur négative pendant au moins 30 minutes.

Indiqué en cas d'hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie...

Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains.

Ensuite, agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer la pochette sur la partie à traiter.

Destiné exclusivement à un usage externe. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. Sachet avec triple soudures pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Plusieurs couches permettent d'éviter la condensation.

Informations complémentaires

Durée d'efficacité : environ 30 min selon la température des corps en contact

Durée de vie du produit : 5 ans.

Stockage : A température ambiante, dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, des flammes ou des étincelles.

Caractéristiques techniques

Marque	Dispotech
Dimensions	de la pochette : 14 x 18 cm
Caractéristiques produit	Durée d'efficacité : environ 30 min selon la température des corps en contact Durée de vie du produit : 5 ans. Stockage : A température ambiante, dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, des flammes ou des étincelles.
Couleur	Blanc, Bleu, Vert
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Matière	Composition : Urée, chlorure d'ammonium et eau. Sac externe en polyéthylène avec thermosoudure, imperméabilité et résistance
Unité de vente	à l'unité
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	30059099

Photos

