



[Fiche technique]

# Sangle araignée pour plan dur

Réf. 509027 - 509026

#### Assure une immobilisation complète, rapide et facile du corps.

Conçue pour assurer une immobilisation complète, rapide et facile du corps, Particulièrement indiquée pour un usage sur tout type de plan dur et civières. Avec un anneau permettant de régler la hauteur de chaque sangle.

## Caractéristiques techniques

**Couleur** Orange, Rouge, Jaune, Vert, Bleu Clair

Conforme 10g Non

Matière Toile en polypropylène avec attaches velcro

Unité de vente boite de 5

Instructions d'utilisation Mode d'emploi :

Avant utilisation de la sangle repérer les blessures du patient et faire attention à celles-ci. L'opération de

sanglage du patient doit être réalisée par du personnel habilité et formé.

Vérifier le produit avant son utilisation.

1- Placer le patient sur le plan dur .

2- Fixer les différentes parties du corps du patient sur le plan dur à l'aide de la sangle araignée.

3- Vérifier si les sangles maintiennent correctement le patient.

4- Au cours du transport du patient prêter attention aux scratchs au niveau des cuisses du patient et les ajuster

si nécessaire.

**Entretien** Lavable en machine à 40°C.

Partie du corps

**Etanche** Non



#### Références

Réf. 509027 Sangle araignée pour plan dur - Adulte

Dimensions: (LxI): 77 à 146 x 5 cm

Taille âge : Adulte Poids : 398 g

Réf. 509026 Sangle araignée pour plan dur - Enfant

Dimensions : (LxI) : 64 à 121 x 5 cm

Taille âge : Enfant Poids : 296 g

### **Photos**

