



[Fiche technique]

Simulation de doigt coupé

Réf. 333026

L'image représentée fait figurer le résultat final d'une fausse plaie. A combiner avec gamme de maquillage secourisme : pinceau, dissolvant, fard

Prothèse pour simulation de plaie hémorragique ou de fracture.

Mise en situation très rapide : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

Informations complémentaires

Plaies réutilisables.


Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	Plaies réutilisables.
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Réalisation du maquillage : Étape n°1 : Appliquer une fiche couche de latex sur la 2ème phalange du majeur Étape n°2 : Faire un cylindre de Plasto-Nat de la taille de la phalange Étape n°3 : Colorer le doigt avec du Fard jaune Étape n°4 : Appliquer sur la bordure de la partie à couper du Fard bleu puis superposer du Fard rouge. Positionner le cylindre de Plasto-Nat en continuité de la phalange Étape n°5 : Etirer le Plasto-Nat du centre vers l'extérieur Étape n°6 : Colorer l'intérieur du cratère avec le pinceau et du fard rouge sans colorer les lèvres du Plasto-Nat Étape n°7 : Remplir le cratère de sang gélifié et recouvrir les bords du Plasto-Nat
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 333300 - Palette de fard crème 10 couleurs Réf. 333301 - Sang gélifié en tube de 30 g Réf. 333304 - Latex naturel liquide 60 ml Réf. 333306 - Plasto-Nat 35 ml Réf. 333316 - Plasto-Nat 200 ml Réf. 333318 - Dissolvant pour colle Réf. 333320 - Pinceau maquillage pro N°2 Réf. 333321 - Pinceau maquillage pro N°6 Réf. 333032 - Sang artificiel normal 125

Photos






Doigt coupé

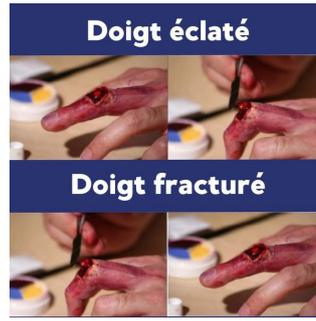




Doigt éclaté

Doigt fracturé

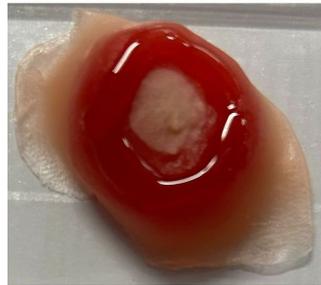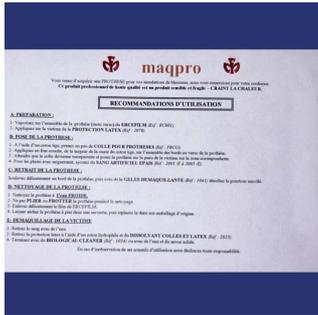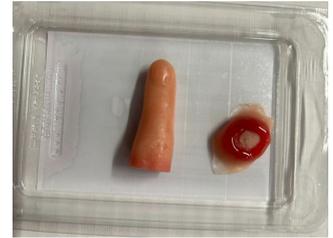

Doigt éclaté

Doigt fracturé

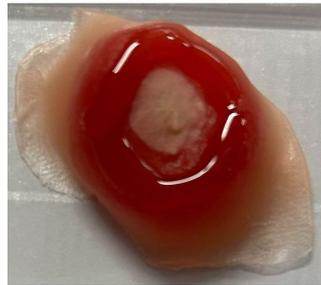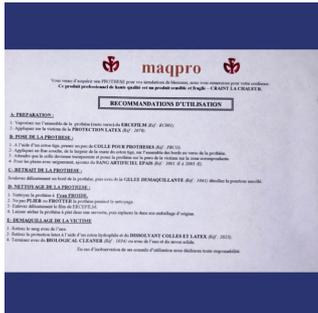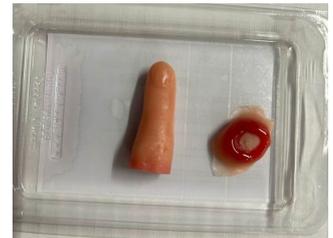

Doigt coupé