



[Fiche technique]

## Surfa Safe Premium

Réf. 120052

### Solution détergente désinfectante des surfaces et des DM

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection de toutes surfaces (matériel médical, paillasse).

Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre.

Idéal pour les soins intensifs et autres zones à haut risque.

Formule efficace sans ingrédients inutiles (sans parfum ni colorant).

Prêt à l'emploi.

### Informations complémentaires

Séchage rapide et sans trace des surfaces.

Formule permettant une large compatibilité avec les matériaux.

pH : 6 (à +/- 0,5).

Stockage entre +5°C et +25°C.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide

Levuricide

Tuberculocide

Virucide

Flacon capot rouge avec dispenseur de mousse.

## Caractéristiques techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                     | Anios   |
| <b>Volume</b>                     | Flacon pulvérisateur de 750 ml  |
| <b>Matière</b>                    | Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.   |
| <b>Poids</b>                      | 830 g   |
| <b>Normes et Certification</b>    | EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 1275, EN 13624, EN 14476  |
| <b>Instructions d'utilisation</b> | <p>Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.<br/>Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.<br/>Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.</p> |
| <b>Format</b>                     | Aerosol   |