



[Fiche technique]

Station lave oeil murale DROP

Réf. 970490

Contient le nécessaire pour un efficace premier lavage d'urgence des yeux.

DROP est thermoformé avec un couvercle transparent.

Se fixe facilement au mur par vis et chevilles, fournies avec le kit.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(LxIxp) : 41 x 32 x 7,5 cm
Stérile	Stérile
Poids	1,5 kg
Livré avec	2 flacons de solution saline stérile de 500 ml, 2 bouchons lave-oeil ergonomiques et 1 miroir.
Instructions d'utilisation	Tirez légèrement sur le couvercle transparent et laissez-le tomber vers le bas. Sortez une des bouteilles, tournez le bouchon de l'œillère, le sceau de sécurité se brise et vous pouvez utiliser la solution. L'œillère anatomique permet de diriger correctement le jet de solution, obtenant ainsi un lavage des yeux efficace et sans gaspillage.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s