



[Fiche technique]

Stylo oculaire magnétique

Réf. 970900

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil

Doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil. De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières. Pratique à ranger et hygiénique grâce aux embouts qui peuvent s'emboiter dans le corps du crayon.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm

Couleur Blanc
Conforme 10g Non

Matière plastique

rondelles en néoprène boucle en nylon

Unité de vente A l'unité

Poids 15 g

Instructions d'utilisation -Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde.

-Effectuer l'extraction et rincer abondement avec de l'eau.

-Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une

solution désinfectante.

-Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Code SH 9018501000

Référence fabricant (MPN) 640



Photos

