



[Fiche technique]

Stylo oculaire magnétique

Réf. 970900

Doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil.

De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières. Pratique à ranger et hygiénique grâce aux embouts qui peuvent s'emboîter dans le corps du crayon.

Caractéristiques techniques


Dimensions	(Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm
Couleur	Blanc
Poids	15 g
Instructions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">-Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde.-Effectuer l'extraction et rincer abondamment avec de l'eau.-Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante.-Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Photos




Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction cors étranger cornéen globe de l'oeil

Boucle en nylon pour enlever les poussières

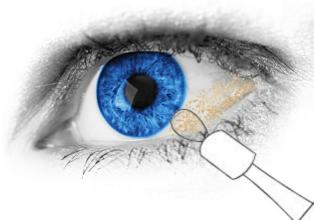

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction cors étranger cornéen globe de l'oeil

Aimanté pour pouvoir enlever les limailles

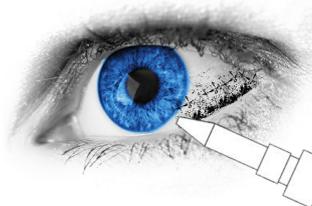

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction cors étranger cornéen globe de l'oeil