



[Fiche technique]

## Thermomètre au gallium

Réf. 293012

### Thermomètre galistan 12.8cm

**Sans pile et sans mercure > au gallium**

**Utilisation orale, rectale ou axillaire**

Pour contrôle de la température du corps de 3 manières différentes : orale, rectale ou axillaire.

Thermomètre médical en verre simple d'utilisation permet l'obtention d'une température précise rapidement.

Usage domestique et hospitalier.

## Informations complémentaires

Précision: - 0,15°C à + 0,1°C.

Plage de mesure: 35,5 à 42°C.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	12,8 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Précision: - 0,15°C à + 0,1°C. Plage de mesure: 35,5 à 42°C.
<b>Couleur</b>	Bleu, Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Gallium Indium Etain
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	37 g
<b>Livré avec</b>	Un étui de protection en plastique rigide
<b>Garantie</b>	A vie
<b>Normes et Certification</b>	NF EN 12470-1
<b>Instructions d'utilisation</b>	Avant de commencer la prise de température, vérifier que la valeur affichée par la colonne de gallium est inférieure à 36°C. Positionner le thermomètre sur le corps, d'après le type de relevé souhaité (rectal, buccal, axillaire). Après 4 minutes env. le thermomètre a relevé la température corporelle.
<b>Entretien</b>	Nettoyer le thermomètre avant et après utilisation avec de l'eau savonneuse froide puis désinfecter avec un coton ou un petit chiffon imbibé d'alcool.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de classe 1m
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	90251120
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	TER174