

[Fiche technique]



Thermomètre digital électronique hypothermique

Réf. 999021

Large plage de mesure de 28°C à 43,9°C

Permet de prendre la mesure des températures corporelles des enfants et des adultes de 3 manières différentes, orale, rectale ou axillaire.

Alarme de fièvre si température supérieure à 37,5°C.

Mémorisation automatique de la dernière mesure.

Ecran LCD.

Informations complémentaires

Precision de mesure : +/- 0.1%

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxe) 15,9 x 2,3 x 1,5 cm
Caractéristiques produit	Precision de mesure : +/- 0.1%
Couleur	Blanc, Bleu
Alimentation	Pile LR41
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en plastique Sonde en acier inoxydable
Unité de vente	A l'unité
Poids	22 g (piles incluses)
Autonomie	Pus de 200 h (en fonctionnement continu)
Garantie	24
Normes et Certification	DIN ISO 80601-2 56 EN 13845
Indice de protection	IP 20
Instructions d'utilisation	Mesure par voie rectale : Veuillez introduire le thermomètre d'environ 2 cm dans le rectum et attendre 4 minutes. Retirer le thermomètre et visualiser la mesure. Nous vous conseillons une crème lubrifiante pour les personnes sensibles. Mesure par voie buccale : Veuillez introduire le thermomètre sous la langue et attendre 4 minutes. Retirer le thermomètre et visualiser la mesure. Mesure par voie axillaire : Veuillez placer le thermomètre sous l'aisselle et attendre 4 minutes. Retirer le thermomètre et visualiser la mesure.
Entretien	Nettoyer la sonde avant et après utilisation Essuyer la sonde avec une solution savonneuse douce et à l'eau froide Ensuite, désinfecter la sonde et la partie inférieure de la gaine avec une lingette imbibée d'alcool isopropylique à 70° Appareil imperméable mais pas étanche à l'eau. Ne pas l'immerger entièrement. Ne pas faire bouillir ni nettoyage dans une étuve.
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Poids du produit	0.02

Photos

