



[Fiche technique]

Trousse oculaire 2 en 1

Réf. 970970

Trousse oculaire comprenant tout le matériel nécessaire pour l'extraction de corps étrangers.

Le stylo est doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil.

De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques ou les poussières.

Le flacon contenant une solution de Chlorure de sodium stérile à 0,9 % solution permet de laver l'oeil et de soulager l'inconfort suite aux corps étrangers dans les yeux.

Trousse équipée d'un support mural.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) Trousse 26 x 18 x 4.5 cm
Composition de l'ensemble	1 flacon lavage oculaire 200 ml 10 compresses stériles 20 x 20 cm 1 loupe oculaire 1 stylo oculaire 1 pince à écharde 1 scellé
Matière	Trousse en polypropylène
Instructions d'utilisation	Utilisation du stylo oculaire : -Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondamment les yeux avec de l'eau ou la solution de lavage oculaire fournie. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s
Accessoires et Consommables	Réf. 970900 - Stylo oculaire magnétique

Photos



Trousse de secours avec rince
œil