



[Fiche technique]

## Sac urinal avec substance absorbante Care Bag

Réf. 304771

Sac urinal masculin avec un tampon super-absorbant et anti-odeurs gélifiant les matières et urines.  
Remplace l'urinal plastique.  
Permet d'uriner discrètement à tout moment.

## Informations complémentaires

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.  
Avec cordons de serrage coulissants.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Cleanis
<b>Dimensions</b>	(Lxl) 38 x 16 cm. Epaisseur 40 µ
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Matière</b>	Sac en polyéthylène basse densité (PEBD) muni de doubles cordons de serrage. Tampon super-absorbant : support non-tissé à base de fluff (cellulose) et de Polymère Super-Absorbants (SAP)
<b>Unité de vente</b>	Lot de 20
<b>Instructions d'utilisation</b>	Mode d'emploi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrir la boîte et prendre un sac</li><li>2. Déplier le sac, l'ouvrir et le tenir avec les mains</li><li>3. Uriner dans le sac</li><li>4. Attendre que le contenu (+/-450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ</li><li>5. Pour fermer, tirer les cordons de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre puis nouer</li></ol> Elimination : Risque de pollution après incinération : conforme à la législation. Aucun rejet de dérivé chloré propre à la formation de dioxine.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1